

## Detergenti e Disinfettanti chimici idonei per il Palloni rianimatori Ambu®



La lista qui sotto è un elenco di detergenti e disinfettanti conosciuti da utilizzare per i palloni rianimatori Ambu. Per favore annotate quanto segue :

- Alcuni detergenti e disinfettanti potrebbero causare decolorazione senza però danneggiare la stabilità e la prestazione del prodotto.
- L'uso di questi prodotti e la stabilità dei palloni rianimatori non è stata verificata da Ambu. Questo elenco di detergenti e disinfettanti è stato fornito dai clienti, redatto da Ambu.

### Pulizia Meccanica

Prodotto	Agenti per la pulizia e la disinfezione	Azienda
Ambu Mark IV	Neodisher MA	Dr. Weigert
	Neodisher MediClean	Dr. Weigert
	Neodisher MediKlar	Dr. Weigert
Ambu Mark IV Baby	Neodisher MA	Dr. Weigert
	Neodisher MediClean	Dr. Weigert
	Neodisher MediKlar	Dr. Weigert
Ambu Mark III	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu Baby R	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu® Maschere Facciali in Silicone (Blu)	Sekumatic FR	Henkel-Ecolab
	Sekumatic FNZ	Henkel-Ecolab
	Sekumatic FRE	Henkel-Ecolab
	Neodisher AN	Dr. Weigert
Ambu® Maschera Facciale Trasparente (Nero)	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab

## Pulizia Manuale

Prodotto	Agenti per la pulizia e la disinfezione	Azienda
Ambu Mark IV	Deson	Brenntag
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu Mark IV Baby	Deson	Brenntag
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu Mascarilla Silicona Estándar	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensides	-
	Non-ionic tensides	-
Ambu Mark III	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensides	-
	Non-ionic tensides	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
Ambu Baby R	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Lysetol V NEU	Schülke & Mayr
	Gigasept AF	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
	Anionic tensides	-
	Non-ionic tensides	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
Ambu® Maschere Facciali in Silicone (Blu)	Gigasept AF	Schülke & Mayr
	Lysetol V	Schülke & Mayr
	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Lysetol FF	Schülke & Mayr
	Sekusept aktiv	Henkel-Ecolab
	Sekusept Pulver Classic	Henkel-Ecolab
	Anionic tensides	-
	Non-ionic tensides	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
	Lysetol AF	Schülke & Mayr
Ambu® Maschera Facciale Trasparente (Nero)	Lysetol MED	Schülke & Mayr
	Incidur	Henkel-Ecolab
Ambu Aura40	Neodisher MediClean forte	Dr. Weigert
	Anionic tensides	-
	Non-ionic tensides	-
	Chlorine/bleach	-
	Korsolin	Bode
	Gigasept FF	Schülke & Mayr
	Cidex	J&J
Lysetol AF	Schülke & Mayr	

### Sostanze da evitare

Disinfettanti contenenti fenoli

#### Ambu A/S

DK-2750 Ballerup  
www.ambu.com

#### Ambu S.r.l

Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale  
Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza  
MB - IT  
T +39 039 657811  
F +39 039 6898177  
www.ambu.it