

SCHEMA TECNICA

Ambu® Aura-i™ è una maschera laringea monouso progettata per l'uso durante le procedure anestetiche di routine e di emergenza in pazienti a digiuno. L'Aura-i presenta l'originale curva anatomica per favorire un inserimento rapido ed è inoltre dotata di una cuffia gonfiabile sottile e morbida, in grado di creare una tenuta con una bassa pressione della cuffia.

In caso di situazione "Cannot Intubate - Cannot mask Ventilate" (CI-CV), in cui l'obiettivo è intubare il paziente, Aura-i può essere utilizzata come condotto per l'intubazione endotracheale diretta assistita da un endoscopio flessibile (come l'Ambu® aScope™).

La dimensione del tubo ET consigliata è indicata sul connettore della maschera.

Aura-i è disponibile in 8 dimensioni per tutti i tipi di paziente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cuffia sottile e morbida in grado di stabilire una tenuta ottimale con un gonfiaggio ridotto

Curva anatomica originale

Capacità di intubazione con tubi ET standard

Il design della cuffia impedisce il ripiegamento

La resistenza al morso sulla parte superiore del connettore previene le occlusioni

Comodi marker di profondità per monitorare la posizione corretta

Il palloncino pilota identifica le dimensioni della maschera e fornisce un'indicazione tattile del grado di gonfiaggio

Marker di navigazione per guidare l'ottica flessibile

Confezione con codice colore e istruzioni per l'uso

Sicura per la risonanza magnetica

CND: R01020102

RDM: 2334271

Dispositivo di classe IIa - sterile

SPECIFICHE

	Pediatria				Adulto			
Misura maschera	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Codice colore								
Peso paziente	2 - 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Massimo volume intracuffia	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Massima pressione intracuffia	60 cmH ₂ O							
Dimensione max strumento*	5.0 mm	6.0 mm	8.2 mm	9.5 mm	10.2 mm	11.5 mm	12.5 mm	12.5 mm
Connettore	15 mm maschio (ISO 5356-1)							
Valvola di gonfiaggio Luer compatibilità del cono	Cono Luer compatibile con le apparecchiature conformi a ISO 594-1 e ISO 80369-7							
Temperatura di stoccaggio	10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)							
Peso maschera approx.	11 g	15 g	21 g	35 g	38 g	56 g	77 g	98 g
Volume interno della via ventilatoria	4.8 ± 0.6 ml	5.9 ± 0.4 ml	8.8 ± 1.0 ml	13.8 ± 0.6 ml	15.3 ± 0.7 ml	23.6 ± 1.3 ml	30.7 ± 0.7 ml	36.1 ± 0.4 ml
Caduta di pressione determinata secondo ISO 11712 allegato C	0.3 cmH ₂ O a 15 l/min	0.2 cmH ₂ O a 15 l/min	0.3 cmH ₂ O a 30 l/min	0.2 cmH ₂ O a 30 l/min	0.3 cmH ₂ O a 60 l/min	0.2 cmH ₂ O a 60 l/min	0.2 cmH ₂ O a 60 l/min	0.2 cmH ₂ O a 60 l/min
Min. gap interdente	12 mm	14 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	31 mm
Lunghezza nominale della via ventilatoria interna	9.1 ± 0.5 cm	10.5 ± 0.6 cm	12.2 ± 0.7 cm	14.5 ± 0.9 cm	14.2 ± 0.9 cm	16.6 ± 1.0 cm	17.8 ± 1.1 cm	19.3 ± 1.2 cm

Uso intubazione

Max. tubo ET	3.5	4.0	5.0	5.5	6.5	7.5	8.0	8.0
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* La dimensione massima dello strumento è intesa come la scelta del diametro appropriato di un dispositivo da far passare attraverso il tubo di Aura-i.

MATERIALI

Prodotto	Senza ftalati	Materiale
Tubo paziente	Sì	PVC
Cuffia	Sì	PVC
Connettore	Sì	PVC
Palloncino pilota	Sì	PVC
Valvola	Sì	PP, PC, Gomma siliconica verde
Tubo pilota	Sì	PVC

Ambu Aura-i non contiene lattice di gomma naturale

Packaging	Quantità	
Busta	1	Tyvek®/Polietilene Tereftalato (PET)/Polietilene (PE)
Scatola	10	Cartone

SPECIFICHE ORDINE

Ref.	Misura	Tipo
329 100 000	1	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 150 000	1½	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 200 000	2	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 250 000	2½	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 300 000	3	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 400 000	4	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 500 000	5	Maschera laringea monouso - Intubabile
329 600 000	6	Maschera laringea monouso - Intubabile



Marcature sul connettore per guidare il corretto posizionamento



Intubazione endotracheale diretta con ottica flessibile e tubi ET standard

Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu Srl
Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 039 6578100
ambu.it

CE 2797

US: Rx only