

Ambu® AuraGain™

Un nuovo livello di sicurezza ed efficienza



-
- Accesso gastrico
- Possibilità di intubazione
- Elevate pressioni di tenuta



Ambu Italia è su LinkedIn
Seguici scannerizzando il codice QR



Ambu® AuraGain™

Un nuovo livello di sicurezza ed efficienza

AuraGain è l'unica maschera laringea a curvatura anatomica con accesso gastrico integrato e possibilità di intubazione, che porta la sicurezza del paziente e l'efficienza della gestione delle vie aeree a un livello superiore



Gestione delle vie aeree **semplificata**

Ambu AuraGain consente di praticare un'intubazione diretta delle vie aeree, a prescindere dalla previsione di difficoltà.



Quando la sicurezza è fondamentale

Esistono situazioni in cui si riscontrano vie aeree difficili e tali situazioni si presentano in modo inaspettato. In caso di situazione imprevista, in cui lo scopo fondamentale è intubare il paziente, AuraGain può essere utilizzata come via per un'intubazione endotracheale, migliorando la sicurezza del paziente.



Posizionamento **ottimale** nelle vie aeree

Ambu AuraGain permette un posizionamento rapido e corretto grazie alla curva anatomica sviluppata da Ambu, garantendo elevate pressioni di tenuta.



Facile posizionamento

La curva preformata segue l'anatomia delle vie aeree del corpo umano, facilitandone il posizionamento e la tenuta. Questo rende AuraGain la scelta migliore per tutte le esigenze cliniche e il grado di esperienza dell'utilizzatore.



Controllo gastrico **efficace**

Ambu AuraGain è la maschera di nuova generazione Ambu che permette una semplice aspirazione e decompressione dello stomaco tramite un sondino gastrico.



Canale di drenaggio per ridurre il rischio di Ab Ingestis

AuraGain è progettata per un rapido inserimento del sondino gastrico grazie alla superficie interna ad attrito ridotto del canale di drenaggio. Se necessario, una volta che il sondino gastrico è inserito, il personale clinico può aspirare sostanze liquide o aeriformi dallo stomaco.



Elevata **pressione di tenuta**

La cuffia ultrasottile e morbida di AuraGain si adatta con efficacia all'anatomia del paziente e può arrivare a offrire una pressione di tenuta fino a 40 cm H₂O.

Comprovata pressione di tenuta fino a

40 cm H₂O*



Morbida cuffia gonfiabile

AuraGain assicura un'elevata pressione di tenuta con un ridotto gonfiaggio della cuffia riducendo al minimo i traumi sui tessuti molli.

Altre caratteristiche

Area di resistenza al morso

Una speciale area di resistenza al morso previene l'occlusione delle vie aeree e migliora il comfort del paziente. Apprezzabile nei casi in cui il paziente morda la maschera.

Punta rinforzata

Ambu AuraGain presenta una punta rinforzata che permette di prevenire la piegatura durante l'inserimento, garantendo una tenuta circolare intorno alla laringe.

Doppio anello di ventilazione per misure 1 e 1,5

Il design innovativo delle maschere neonatali permette una riduzione dello spazio morto fino al 39%*, migliorando l'ossigenazione in particolare nei pazienti pediatrici.



Doppio anello, disponibile nelle misure neonatali #1 e #1,5

Maschera in materiale PVC


Uno studio ha dimostrato che le maschere in PVC hanno una pressione intracuffia stabile, diversamente dalle maschere laringee con cuffia in silicone.*

Facile introduzione con markers

Ambu AuraGain presenta tre marker disegnati sulla maschera che permettono all'operatore di facilitare il posizionamento della stessa.



Marker che guidano l'inserimento dell'ottica flessibile.

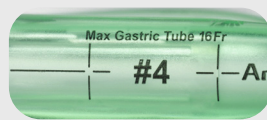

Marker che indicano la posizione corretta della maschera.

*Ahmad, S, Wong, KK, Wang, CY (2011) - The effects of nitrous oxide oxygen anaesthesia on laryngeal mask airway cuff pressure, positioning and pharyngeal morbidity: comparison of the LMA Classic with the Ambu AuraOnce laryngeal mask.

Approfitta di Ambu For You!

Insieme per la formazione

Obiettivo	A chi è rivolto	Modalità
<p>Divulgare le conoscenze teoriche e tecniche dei device Ambu e ampliare il livello di autonomia e sicurezza nell'uso dei dispositivi</p>	<p>Al personale che già utilizza i nostri dispositivi e agli operatori interessati a conoscere tutte le soluzioni Ambu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hospital Meeting • Training personalizzato

Come organizzarlo

È facile e veloce. Tramite il nostro **responsabile di zona**, oppure contattando marketingitalia@ambu.com o scansionando il QR Code.



Nota bene

Ricordiamo che la nostra presenza è solo e unicamente indirizzata alla spiegazione dei nostri dispositivi. La decisione di utilizzarli o meno è sempre a discrezione del medico, responsabile del paziente; il personale Ambu può solo illustrare le peculiarità dei presidi senza interagire in alcun modo con il paziente. Ambu For You non è un corso con crediti ECM.

Specifiche per l'ordinazione



Codice Articolo	Misura	Tubo ET massimo	Sondino gastrico massimo	Descrizione
408 100 000	1	3.5	6 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 1
408 150 000	1 ½	4.0	8 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 1 ½
408 200 000	2	5.0	10 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 2
408 250 000	2 ½	5.5	10 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 2 ½
408 300 000	3	6.5	16 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 3
408 400 000	4	7.5	16 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 4
408 500 000	5	8.0	16 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 5
408 600 000	6	8.0	16 Fr	Ambu® AuraGain™ misura 6

